

Ursachen für die Fehlermeldung – GAS – beim H2-Monitor Micro H₂ die uns aus der täglichen Praxis bekannt wurden:

FEHLERMELDUNG „GAS“, „ERROR“

Bei diesen Fehlermeldungen ist die Funktion von Micro H₂ gesperrt.

Bedeutung der Fehlermeldung: ***Irritation des hochempfindlichen Sensors/Zerstörung des Sensors***

Mögliche Gründe:

- **Feuchtigkeit oder Desinfektionsmittel ist auf die Sensor-Oberfläche gelangt.**
- **Umgebungs-Gase, die über Desinfektionsmittel/Waschmittel (Labor!) entstehen können, beeinträchtigen die Funktionsfähigkeit.**
- **Raumspray führt zu Irritationen des Sensors.**
- **Starkes Parfüm führt zu Irritationen des Sensors.**
- **Alkohol führt zu Irritationen des Sensors.**
- **Zwischen 2 Messungen konnte sich der Sensor nicht auf seine Ausgangsposition einstellen.**
- **(Sensor braucht ca. 4 - 10 Minuten, um sich zu rekalisieren, Plastik-Mundstück in dieser Zeit vom Gerät nehmen!)**
- **Gebrauch des Gerätes in einer Umgebung mit Tabak-Rauch, Abgasen etc.**
- **Starker Raucher bläst auf den Sensor (12 Stunden vor einer Untersuchung darf nicht geraucht werden!)**

Was ist nach dieser Meldung zu tun?

Legen Sie das Gerät ausgeschaltet für ca. 15 Minuten in einen Raum mit Normal-Luft und entfernen Sie während dieser Zeit das Plastik-Mundstück. Korrigieren Sie die Bedingungen im Raum, wo die Messungen stattfinden.

Nach diesen Maßnahmen wird der Sensor in den meisten Fällen wieder einwandfrei arbeiten.

Allerdings kann auch der Sensor zerstört sein. Falls das Gerät auch nach einem Tag in einer normalen Umgebung weiterhin die Anzeige „GAS“ , „ERROR“ meldet, senden Sie bitte das Gerät an unseren Service.

KEINE GERÄTEFUNKTION

Im eingeschalteten Zustand wurde die Batterie gewechselt und irrtümlich der Strom-Anschluss verpolt mit der Batterie in Kontakt gebracht.

In einem solchen Fall ist das Stromversorgungs-Modul zerstört und das Gerät muss in den Service.

Empfehlung: Immer Gerät ausschalten, wenn ein Batteriewechsel durchgeführt wird.