

Installation von Ultraschall Software Smart-V-Link, Version 3.1 Rev. 0.2

Wir empfehlen besonders unter dem Betriebssystem Windows 7, zunächst die Treiber-Software für den seriellen/USB Port zu installieren.

In einem zweiten Schritt können Sie das Programm - Smart-V-Link installieren.

Legen Sie also die Programm CD in das Laufwerk. Ihr Computer sucht nach einer Startdatei und wird in einem Fenster eine Meldung ausgeben.



Schließen Sie dieses Fenster. Damit unterbrechen Sie die Softwareinstallation.

Verbinden Ihr Ultraschall-Gerät über das USB Kabel mit Ihrem Computer. Schalten Sie Ihr US Gerät ein.

Ihr Betriebsprogramm erkennt – Neu Hardware gefunden. Weisen Sie das Betriebsprogramm an, auf Ihrem Computer/CD/DVD Laufwerk nach geeigneter Treiber-Software zu suchen.

Installation von Ultraschall Software Smart-V-Link, Version 3.1 Rev. 0.2



Nach kurzer Zeit meldet das Betriebssystem:



Nunmehr können Sie die Programm-Software installieren.

Klicken Sie mit dem Explorer 2-mal auf die Datei setup.exe im Programmverzeichnis in Ihrem CD/DVD Laufwerk, um die Programm-Installation zu initiieren. Folgen Sie den Meldungen am Bildschirm. Die Installation erfolgt in wenigen Sekunden.